



Medizinisch gegerbtes Lammfell waschen

Lammfelle haben eine Selbstreinigungswirkung. Meist genügt ausschütteln und absaugen. Sollten Sie doch einmal das Fell waschen wollen, befolgen Sie am besten diese Waschanleitung

Waschen: Medizinisch gegerbte Lammfelle können Sie mit Handwäsche oder in der Waschmaschine im Wollwaschgang bei **maximal 30°C** waschen.

Wir empfehlen die Benutzung eines Fellwaschmittels oder eines Wollwaschmittels und reichlich Weichspüler.

Trocknen: Nach dem Waschen können Sie das Fell leicht schleudern und entweder im Wäschetrockner bei Kaltluft oder an der frischen Luft trocknen, aber nicht in der Sonne, auf der Heizung oder am Kamin. Während des Trocknens müssen Sie das Fell immer wieder in alle Richtungen in Form ziehen. Das lockert die Lederfasern und hilft eine Verhärtung des Leders zu vermeiden. Bevor das Fell ganz getrocknet ist, kneten Sie es wie einen Teig oder ziehen Sie es über eine runde Kante, z.B. eine Stuhllehne. Sie merken gleich wie das Leder geschmeidiger wird.

Kämmen: Merino Schafe für die medizinisch gegerbten LANABEST Lammfelle haben normalerweise Locken und nur durch ein sehr aufwändiges maschinelles Kämmen und Föhnen werden sie so glatt wie das fabrikfrische Fell. Im Hausgebrauch werden die gewaschenen Felle aber immer etwas lockig bleiben. Das tut der Qualität und der Zartheit aber keinen Abbruch. Wenn Sie die Wollhaare glatter wünschen, hilft ausgiebiges kämmen mit Hilfe einer Hundebürste mit Stahlzinken und Föhnen.